

Dezinficēšana, Tīršana, Higiena



GREEN & CLEAN


Rokas

Virsmas

Specifisks pielietojums

Instrumenti

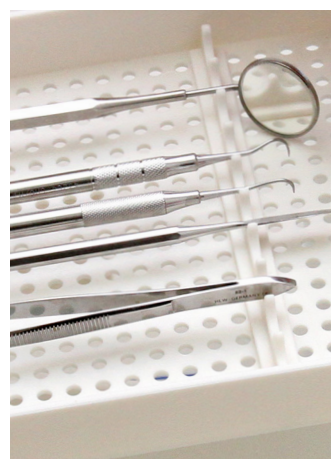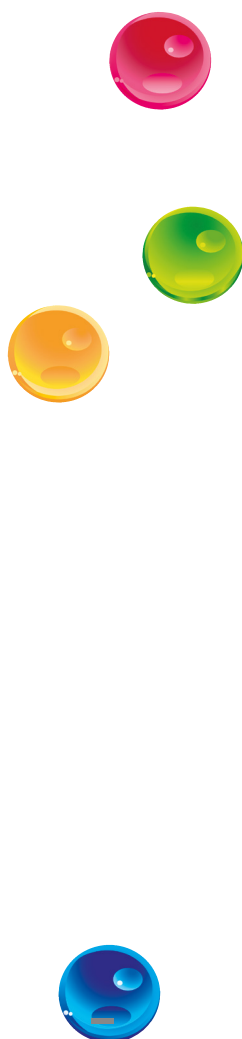

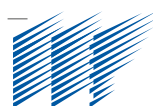 **METASYS**



GREEN&CLEAN HD

Barojošs un kopjošs līdzeklis higiēniskai un ķirurģiskai roku un apakšdelmu dezinfekcijai

- Augstas kvalitātes alkoholu saturošais līdzeklis aizkavē ādu no sausināšanas
- Izteikts dermatoloģisks ekspertu atzinums (Dermaconsult GmbH)
- Bez smaržas
- Ādai dabīga pH vērtība
- Euro pudeles var uzstādīt visos ierastajos pie sienas stiprināmos dozatoros
- Iekļauts DGHM/VAH un RKI sarakstos

Dezinfektanta spektrs

ierobežota vīrusu iznīcināšana (piem., HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex I tipa vīruss, rota vīruss, norovīruss), baktericīds/fungicīds (C. albicans), tuberkolociāds

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main

PD Dr. med. F.-A. Pitten

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Iedarbības laiks

- Higiēniska roku dezinfekcija: 3 ml GREEN&CLEAN HD 30 sek. ieberzēt plaukstās (norovīruss: 1 minūte).
- Ķirurģiska roku dezinfekcija: 10 ml GREEN&CLEAN HD 3 min. ieberzēt plaukstās un apakšdelmos.

Pasūtījuma artikuli

- Euro pudele 500 ml, Pasūtījuma artikuls: 60030162
- Euro pudele 1000 ml, Pasūtījuma artikuls: 60030161
- Uzpildes komplekts 2, kārbā 5 l, Pasūtījuma artikuls: 60030063
- Uzpildes komplekts 3, 6 x 1000 ml euro pudele, Pasūtījuma artikuls: 60030069
- Uzpildes komplekts 4, 6 x 500 ml euro pudeles, Pasūtījuma artikuls: 60030070



GREEN&CLEAN HL

Ādas kopšanas losjons ar plašu pretmikrobu iedarbību

- Ilgstoša iedarbība pret baktērijām un vīrusiem
- Nesatur sārmus, pH neitrāls
- Aizsargā ādas dabīgo skābumu
- Pasargā ādu no kairinājumiem
- Satur kopjošu piedevu alantoīnu

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Pasūtījuma artikuli

- Euro pudele 1 l, Pasūtījuma artikuls: 60030151
- Sākuma komplekts, 5 x 750 ml pudele + dozēšanas pudele, Pasūtījuma artikuls: 60030051
- Uzpildes komplekts 1, 6 x 750 ml pudeles, Pasūtījuma artikuls: 60030052
- Uzpildes komplekts 2, kārbā 5 l, Pasūtījuma artikuls: 60030053



GREEN&CLEAN HW

Kopjošs roku mazgāšanas losjons ar dabīgām roku kopšanas piedevām

- pH=5,6 kas ir adaptēts ādas dabīgajam skābumam
- Īpaši piemērots jutīgai ādai
- Mitrinātāji novērš ādas izžūšanu pat pie biežas roku mazgāšanas
- Dabīga ādas kopšanas piedeva no cukurbiešu ekstrakta

Pasūtījuma artikuli

- Euro pudele 1 l, Pasūtījuma artikuls: 60030141
- Sākuma komplekts, 5 x 750 ml pudele + dozēšanas pudele, Pasūtījuma artikuls: 60030041
- Uzpildes komplekts 1, 6 x 750 ml pudeles, Pasūtījuma artikuls: 60030042
- Uzpildes komplekts 2, 5 l kanna, Pasūtījuma artikuls: 60030043



SIENAS DISPENSERS

- Ar garo sviru, tilpums 1000 ml HD, HL, HW + 1 x euro pudele HD, Pasūtījuma artikuls: 40200101



GREEN&CLEAN HC

Kopjošs roku krēms ar Šī sviestu, ectoīnu un alantoīnu

- piemērots jutīgai ādai
- baro un mitrina ādu
- atpūtina un padara ādu elastīgu
- samazina ādas trauslumu un plaisas
- ātri uzsūcas

Pasūtījuma artikuli

- 6 x 100 ml tube, Pasūtījuma artikuls: 60030120
- Sākuma komplekts, 1 x 100 ml tube, Pasūtījuma artikuls: 60030122



KRĀNS

- Krāns 5 l kannai, Pasūtījuma artikuls: 40200017

Aizsargpārklājums, pārnēsājamās baktērijas, slimnīcu infekcijas, roku dezinfekcija

Āda ir mūsu ārējais aizsargpārklājums. Sausa, trausla un ieplaisājusi āda samazina ķermeņa aizsargfunkcijas. Ir svarīga pareiza ādas kopšana, lai spētu saglabāt šo dabisko aizsargbarjēru pret patogēniem mikroorganismiem.

Roku higiēna ir viens no vissvarīgākajiem pasākumiem infekcijas profilaksei!

Ikdienas darbā jūs pastāvīgi saskaraties ar baktērijām. Daudzi pētījumi apstiprina, ka rokas ir patogēnu pārnēsāšanas ceļš. Roku dezinficēšana ir izšķiroša, lai pasargātos pret slimnīcu infekcijām. Atbilstoša roku higiēna var samazināt iegūto infekciju skaitu par 40%!

Pareiza roku higiēna palīdz izvairīties no ādas slimību problēmām! Mēs iesakam: izmantot roku kopšanas līdzekļus, kas satur dezinfektantu! (izņemot gadījumos, kad rokas ir kontaminētas). Nodrošiniet, lai roku dezinfekcijas līdzeklis nesausinātu ādu, neļautu tai kļūt trauslai un ieplaisāt. Pirms cimdņu uzvilkšanas ļaujiet rokām pilnībā nožūt.

Dezinficējiet rokas — tikai dariet to pareizi!

Padomi efektīvai roku higiēnai:

- Nagiem jābūt tīriem, īsiem un nelakotiem
- Nevalkājiet nekādus juvelierizstrādājumus
- Ieberzējiet atbilstošu alkoholu saturošu dezinfektanta daudzumu savās sausajās rokās (atstājiet to vismaz uz 30 sek; ķirurģiskai roku dezinficēšanai uz 3-5 min)


Higiēniskā roku dezinfekcija

- Pirms darba vietas sagatavošanas ārstēšanas zonā
- Pēc darba vietas sagatavošanas
- Uzvelkot un novelkot cimdus
- Pirms un pēc ne-ķirurģiskas ārstēšanas

Ķirurģiskā roku dezinfekcija

- pirms ķirurģiskām darbībām

Higiēniskas roku higiēnas dezinfekcijas tehnika

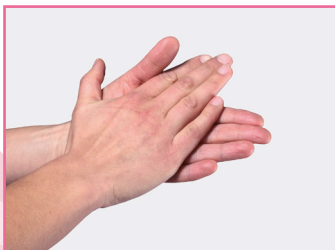


1. Plaukstu pret plaukstu




2. Plaukstu pret plaukstu ar sakļautiem pirkstiem



3. Plaukstu pret delnu ar izplestiem pirkstiem

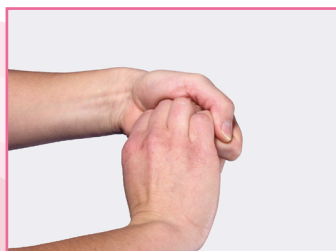

4. Pirkstu ārpusi pret plaukstu

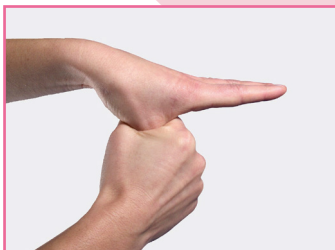

5. Īkšķi plaukstā



6. Pirkstu galus pret plaukstu



GREEN&CLEAN SD

Spirtu saturošs smidzināmais dezinfekcijas līdzeklis medicīnas ierīču virsmu dezinfekcijai (piemēram, zobārstniecības iekārtas pagriežamam galdam, novietņu virsmām, kas nav jutīgas pret spirtu)

- Īss darbības laiks
- Lietošanai gatavs
- Noturības efekts novērš jaunu mikrobu rašanos
- Nesatur formaldehīdu
- Nepiloša izsmidzinātāja galviņa
- Iekļauts DGHM/VAH un ÖGHMP sarakstos
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/ledarbības laiks

- Ierobežota vīrusu iznīcināšana (piem., HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex I tipa vīruss): 30 sekundes
- Baktericīds/fungicīds (C. albicans): 1 minūte
- Tuberkulocīds: 5 minūtes

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Spirts, ceturtejā amonija savienojumi, glioksāls

Pasūtījuma artikuli

- Sākuma komplekts, 5 x 750 ml maisiņi + 1 x 750 ml izsmidzinātāja pudele, Pasūtījuma artikuls: 60030001
- Uzpildes komplekts 1, 6 x 750 ml maisiņi, Pasūtījuma artikuls: 60030002
- Uzpildes komplekts 2, 1 x 5 l kanna, Pasūtījuma artikuls: 60030003
- Uzpildes komplekts 3, 2 x 750 ml maisiņi + 1 x 750 ml izsmidzinātāja pudele, Pasūtījuma artikuls: 60300001
- Ūdens krāns 5 l kannai, Pasūtījuma artikuls: 40200004



GREEN&CLEAN WD

Spirtu saturošas dezinfekcijas salvetes no izturīga flīsa medicīnas ierīču nelielu virsmu dezinfekcijai (piemēram, taisnu/leņķveida uzgaļu ārējām virsmām)

- Īss darbības laiks
- Noturības efekts novērš jaunu mikrobu rašanos
- Ar higiēnisku drošības slēgumu
- Nesatur formaldehīdus
- Dezinfekcijas šķīdums iekļauts DGHM/VAH un ÖGHMP sarakstos
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/ledarbības laiks

- Ierobežota vīrusu iznīcināšana (piem., HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex I tipa vīruss): 30 sekundes
- Baktericīds/fungicīds (C. albicans): 1 minūte
- Tuberkulocīds: 5 minūtes

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Spirts, ceturtejā amonija savienojumi, glioksāls

Pasūtījuma artikuli

- Sākuma, 1 x 120 uzpildīšanas kārbā, Pasūtījuma artikuls: 60030018
- Sākuma komplekts, 1 x 120 uzpildīšanas kārbā, 3 x 120 lielajām salvetēm, Pasūtījuma artikuls: 60030011
- Uzpildes komplekts, 6 x 120 salvetēm, Pasūtījuma artikuls: 60030012



GREEN&CLEAN MT

Ļoti liela izmēra dezinfekcijas salvetes (290 x 270 mm) no plīsumizturīga flīsa. Alkoholu saturošs dezinfekcijas līdzeklis lielu medicīnas ierīču virsmu dezinficēšanai (piem., zobārstniecības iekārtas pagriežamam galdam, novietņu virsmām, kas nav jutīgas pret spirtu)

- Īss darbības laiks
- Lietošanai gatavs
- Noturības efekts novērš jaunu mikrobu rašanos
- Nesatur formaldehīdus
- Iekļauts DGHM/VAH un ÖGHMP sarakstos
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/ledarbības laiks

- Ierobežota vīrusu iznīcināšana (piem., HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex I tipa vīruss): 30 sekundes
- Baktericīds/fungicīds (C. albicans): 1 minūte
- Tuberkulocīds: 5 minūtes

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Spirts, ceturtejā amonija savienojumi, glioksāls

Pasūtījuma artikuli

- Sākuma komplekts, 1 x dozators ar 70 lielajām salvetēm, 1 x SD 750 ml maisiņš, Pasūtījuma artikuls: 60030091
- Sākuma komplekts 1, 1 x dozators ar 70 lielajām salvetēm + 5 x 70 salvetes uzpildīšanai + 6 x SD 750 ml maisiņi, Pasūtījuma artikuls: 60030093
- Sākuma komplekts 2, 1 x dozators kārbā ar 70 lielajām salvetēm + 6 x 70 salvetes uzpildīšanai + 1 x SD 5 l kanna, Pasūtījuma artikuls: 60030094
- MK/MT Uzpildes komplekts 1, 2 x 70 salvetes uzpildīšanai, Pasūtījuma artikuls: 60030095
- MT Uzpildes komplekts 2, 1 x sadales kārbā ar 70 lielajām salvetēm + 5 x 70 salvetes uzpildīšanai, Pasūtījuma artikuls: 60030092
- MK/MT Uzpildīšanas komplekts 3, 4 x 70 salvetes, Pasūtījuma artikuls: 60030097

Padomi pareizai dezinfektanta šķaidīšanai



1. Vienmēr izmantojiet aukstu ūdeni!



2. Ievērojiet ieteikto darbības laiku! Ņemiet vērā rekomendēto dezinfektanta derīguma termiņu!

Virsmu dezinficēšana ar alkoholu



GREEN&CLEAN SK

Alkoholu nesaturošas dezinfekcijas putas medicīnas ierīču virsmu dezinficēšanai (piem., pret alkoholu jutīgu zobārstniecības iekārtas daļu vai rokturu, ādas imitācijas un plastmasas pārsegumi)

- Nesatur alkoholu
- Īss darbības laiks
- Lietošanai gatavs
- Noturības efekts novērš jaunu mikrobu rašanos
- Īpaši piemērots medicīnas ierīču virsmām, kas ir jutīgas pret spirtu
- Nesatur aldehīdus, fenolu un fosfātus
- Iekļauts DGHM/VAH un ÖGHMP sarakstos
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/ledarbības laiks

- HBV/HIV/HCV: 1 minūte
- Baktericīds/fungicīds (C. albicans): 1 minūte

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/
Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Ceturtnajā amonija savienojumi

Pasūtījuma artikuli

- Sākuma komplekts, 1 x 750 ml izsmidzināšanas pudele ar putām, Pasūtījuma artikuls: 60030110
- Sākuma komplekts, 6 x 750 ml izsmidzināšanas pudele + 2 x putas, Pasūtījuma artikuls: 60030111
- Uzpildes komplekts, 1 x 5 l kanna, Pasūtījuma artikuls: 60030112



MĒRGLAZE

- Mērglāze priekš RD N, Pasūtījuma artikuls: 40200016



GREEN&CLEAN MK

Ļoti liela izmēra dezinfekcijas salvetes (290 x 270 mm) no plūsumizturīga flīsa. Alkoholu nesaturošas dezinfekcijas šķīdums lielu medicīnas ierīču virsmu dezinficēšanai (piem., pret alkoholu jutīgu zobārstniecības iekārtas daļu vai rokturu, ādas imitācijas un plastmasas pārsegumi)

- Nesatur alkoholu
- Lietošanai gatavs
- Īpaši piemērots medicīnas ierīču virsmām, kas ir jutīgas pret spirtu
- Noturības efekts novērš jaunu mikrobu rašanos
- Nesatur aldehīdus, fenolu un fosfātus
- Iekļauts DGHM/VAH un ÖGHMP sarakstos
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/ledarbības laiks

- HBV/HIV/HCV: 1 minūte
- Baktericīds/fungicīds (C. albicans): 1 minūte

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/
Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Ceturtnajā amonija savienojumi

Pasūtījuma artikuli

- Sākuma komplekts, 1 dozators ar 70 lielajām salvetēm + 1 x SK 750 ml pudele, Pasūtījuma artikuls: 60030130
- Sākuma komplekts 1, 1 dozators ar 70 salvetes + 6 x 70 salvetes + 1 x GREEN&CLEAN SK 5 l kanna, Pasūtījuma artikuls: 60030131
- MK/MT Uzpildes komplekts 1, 2 x 70 salvetes uzpildīšanai, Pasūtījuma artikuls: 60030095
- MK Uzpildes komplekts 2, 1 x sadales kārbā ar 70 lielajām salvetēm + 5 x 70 salvetes uzpildīšanai, Pasūtījuma artikuls: 60030134
- MK/MT Uzpildīšanas komplekts 3, 4 x 70 salvetes, Pasūtījuma artikuls: 60030097



GREEN&CLEAN RD N

Alkoholu nesaturošs koncentrāts medicīnas ierīču virsmu dezinfekcijai (piemēram, zobārstniecības iekārtas virsmām, kas jutīgas pret spirtu)

- Nesatur alkoholu
- Izciļns materiālu saudzīgums
- Piemērots virsmām no akrila un organiskā stikla
- 5 l koncentrāta, kas atšķaidāmi līdz 2000 l darba šķīduma
- Nesatur aldehīdus
- Iekļauts DGHM/VAH un ÖGHMP sarakstos
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/ledarbības laiks

- Ierobežota vīrusu iznīcināšana (piem., HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex I tipa vīruss):
0,5% šķīdums: 30 minūtes,
1% šķīdums: 15 minūtes
- Baktericīds/fungicīds (C. albicans):
0,25% šķīdums: 4 stundas,
0,5% šķīdums: 1 stunda,
1% šķīdums: 30 minūtes,
1,5% šķīdums: 15 minūtes
- Tuberkulocīds:
2% šķīdums: 1 stunda,
3% šķīdums: 30 minūtes,
4% šķīdums: 15 minūtes

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/
Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Ceturtnajā amonija savienojumi, alkilamīns

Pasūtījuma artikuli

- 4 x 500 ml pudele + mērglāze, Pasūtījuma artikuls: 60030023
- 1 x 5 l kanna, Pasūtījuma artikuls: 60030028

VIRSMAS





GREEN&CLEAN M2

Duālas iedarbības, aktīvs, neputojošs koncentrāts, kas paredzēts atsūkšanas sistēmu un amalgamas atdalītāju dezinfekcijai un dezodorēšanai

- Duāla sistēma (sarkans/zaļš)
- Lielisks pretputošanas aģents
- Viegli rīkoties, izmantojot dispenseru
- Augsta piemērotība videi
- Augsta saderība ar materiāliem
- Lieliska proteīnu šķīdināšanas spēja enzimatiskās iedarbības dēļ
- Ideāls produkts amalgamas separatoriem un gaisa-ūdens separatoriem
- Iekļauts DGHM/VAH sarakstos
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/ledarbības laiks

- HBV/HIV/HCV:
1% šķīdums: 1 stunda
- Baktericīds/fungicīds (C. albicans):
1% šķīdums: 15 minūtes
- Tuberkulocīds:
1% šķīdums: 1 stunda

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Alkilamīns, ceturtējā amonija savienojumi, enzīmi

Pasūtījuma artikuli

- Sākuma komplekts,
2 x 500ml + dispensers,
Pasūtījuma artikuls: 60010201
- Uzpildīšanas komplekts 1,
4 x 500ml pudeles,
aptuveni 334 reizēm,
Pasūtījuma artikuls: 60010203
- Uzpildīšanas komplekts 2,
2 x 500 ml pudeles,
aptuveni 167 reizēm,
Pasūtījuma artikuls: 60010203
- GREEN&CLEAN M2 sarkans,
25 x 500 ml pudeles,
Pasūtījuma artikuls: 60010204
- GREEN&CLEAN M2 zaļš,
25 x 500 ml pudeles,
Pasūtījuma artikuls: 60010205
- Dozators GREEN&CLEAN M2,
Pasūtījuma artikuls: 40200001-BL
- Papildināšanas komplekts
dozatoram GREEN&CLEAN M2
ar 3 atsūkšanas šļaukām,
Pasūtījuma artikuls: 40200002



GREEN&CLEAN H1

Dezinfektants, kas paredzēts lietošanai METASYS automātiskajā higiēnas sistēmā H1

- Aktīva pretputošana
- Optimāls tīrīšanas efekts, izmantojot fermentus
- CE 0408

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Ceturtējā amonija savienojumi, īpašas virsmas aktīvās vielas, enzīmi

Pasūtījuma artikuli

- Uzpildes komplekts, 4 x 500 ml maisiņi,
Pasūtījuma artikuls: 60010021



GREEN&CLEAN MB

Praktisks dispensers uz citronskābes un enzīmu bāzes spļautuves optimālai tīrīšanai

- Šķīdina kaļķu un krāsas nosēdumus
- Izcila proteīnu šķīdināšanas spēja enzimatiskās iedarbības dēļ
- Ideāls produkts amalgamas separatoriem
- CE 0408

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Ceturtējā amonija savienojumi, tensīds, enzīmi

Pasūtījuma artikuli

- Sākuma komplekts,
1 x 1200 ml dozējošā pudele ar birsti,
Pasūtījuma artikuls: 60020005
- Sākuma komplekts,
2 x 500 ml pudeles
+ 2 dozējošā pudeles + 2 birstes,
Pasūtījuma artikuls: 60020001
- Uzpildes komplekts 1,
4 x 500 ml pudeles + 4 birstes,
Pasūtījuma artikuls: 60020002
- Uzpildes komplekts 2,
4 x 500 ml udes,
Pasūtījuma artikuls: 60020004
- Rezerves birstes, 4 gab.,
Pasūtījuma artikuls: 60020008
- Dozējošā pudele ar birsti, tukša,
Pasūtījuma artikuls: 60020009



GREEN&CLEAN IK

Gatavs lietošanai, spirtu saturošs dezinfekcijas aerosols taisnā/leņķa uzgali vai turbīnas ūdens un gaisa vadu dezinfekcijai

- Īss darbības laiks
- Pateicoties fiksētam izsmidzinājam, dezinfekcijas līdzeklim piemīt uzlabota lietošanas drošība
- Viena pudele paredzēta aptuveni 300 lietošanas reizēm
- Multifunkcionāls izsmidzināmais ir piemērots visiem taisnajiem un leņķa galiem, kā arī ir pieejami dažādi adapteri populārāko ražotāju turbīnām
- Dezinfekcijas līdzeklis neaizstāj instrumentu galu eļļošanu
- Iekļauts DGHM/VAH un ÖGHMP sarakstos
- Rūpnīcas atļauja (W&H, Sirona)
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/ledarbības laiks

- Ierobežota vīrusu iznīcināšana (piem., HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex I tipa vīruss): 15 sekundes
- Baktericīds/fungicīds (C. albicans): 2 minūtes
- Tuberkulocīds: 2 minūtes

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. M. Rotter, Vienna
Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Spirts, ceturtā amonija savienojumi

Pasūtījuma artikuli

- 2 x 200 ml aerosola pudele iesk. pirmsmontāžas adapteri:
- Adapteri:
uzgaļi un kontrindikācijas leņķi,
Pasūtījuma artikuls: 60030182
- Izsmidzinātājs savienojams ar turbīnu: W&H,
Pasūtījuma artikuls: 60030183
Bien Air,
Pasūtījuma artikuls: 60030184
KaVo,
Pasūtījuma artikuls: 60030185
Sirona,
Pasūtījuma artikuls: 60030186
Castellini,
Pasūtījuma artikuls: 60030187
NSK,
Pasūtījuma artikuls: 60030188
- Adapteri:
uzgaļi un kontrindikācijas leņķi,
Sirona T1 Classic,
Pasūtījuma artikuls: 60030189



1. Dozētājs, 6 ml



2. Sajaukšana ar ūdeni, 600ml



3. Iesūkšana, katrs 200 ml



4. Atlikušos 200 ml šķīduma no maismā konteinerā izlejiet splaujamtraukā



GREEN&CLEAN WK

Gatavs lietošanai, uz ūdeņraža pārskābes pamata veidots 2% šķīdums zobārstniecības iekārtas ūdens kanālu attīrīšanai un aizsardzībai pret kaļķa nogulšņu veidošanos

- Plašs iedarbības spektrs
- Biofilma veidošanās novēršana
- Nav iespējama rezistences veidošanās
- Novērš kaļķakmens nogulšņu veidošanos
- Kaļķakmens inhibitori: novērš pārkaļķošanu
- Aizsargā taisno un lenķgala uzgaļus
- CE 0408

Aktīvais līdzeklis

Ūdeņraža peroksīds

Pasūtījuma artikuli

- Uzpildes komplekts 1, 4 x 750 ml pudeles, Pasūtījuma artikuls: 60040100
- Uzpildes komplekts 2, 6 x 1000 ml pudeles, Pasūtījuma artikuls: 60040101



GREEN&CLEAN BR

4% ūdeņraža pārskābes šķīdums biofilmas noņemšanai zobārstniecības iekārtas ūdens pārvades kanālos

- Efektīva biofilmas noņemšana tikai 30 minūtēs
- Vienkārša lietošana, ko nodrošina iekrāsots šķīdums
- Ieteicams zobārstniecības iekārtu atjaunošanai, kā arī pirms ūdens attīrīšanas sistēmas uzstādīšanas
- CE 0408

Aktīvais līdzeklis

Ūdeņraža peroksīds

Pasūtījuma artikuli

- 2 x 1000 ml pudeles, Pasūtījuma artikuls: 60040300



GREEN&CLEAN AD

Ļoti efektīvs, gatavs lietošanai šķīdums visu izņemamo protēžu un silikona, poliētera un alginātu nospiedumu ātrai un noturīgai iegremdēšanas dezinfekcijai

- Īss darbības laiks
- Formas noturības slēdziens (Fresenius Institutis)
- Var tikt izmantots alginātiem, silikoniem, poliētera un nospiedumu karotēm
- Neietekmē virsmas kvalitāti un nospiedumu izmēru stabilitāti
- Izcilas tīrīšanas īpašības
- Augsta materiālu saderība
- Nesatur formaldehīdus un fenolus
- Derīguma termiņš: 7 dienas
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/iedarbības laiks

- Ierobežota vīrusu iznīcināšana (piem., HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex I tipa vīruss): 5 minūtes
- Baktericīds/fungicīds (C. albicans): 5 minūtes
- Tuberkulocīds : 5 minūtes

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main

Prof. Dr. med. E. Marth, Graz

Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Ceturtejā amonija savienojumi, alkilamīns, virsmas aktīvās vielas

Pasūtījuma artikuli

- 1 x 5 l kanna, Pasūtījuma artikuls: 60030074



WK TESTA STRĒMELES

GREEN&CLEAN WK testa strēmeles ūdens attīrīšanas sistēmas funkcionalitātes un efektivitātes vizuālai pārbaudei

- krāsu iedaļas uz testa strēmeles norāda dezinfekcijas līdzekļa GREEN & CLEAN WK koncentrācijas līmeni ūdenī
- METASYS WEK Light: iknedēļas pārbaude ir noteikta

Pasūtījuma artikuli

- GREEN&CLEAN WK testa strēmeles, 5 gab./iepakojumā, Pasūtījuma artikuls: 40050502
- 25 gab./iepakojumā, Pasūtījuma artikuls: 40050503
- 50 gab./iepakojumā, Pasūtījuma artikuls: 40050504



DEZINFEKCIJAS VANNA

- Instrumentu dezinfekcijas vanna
- Tilpums 1,25 l, vāks un šķiduma notecēšanas siets, Pasūtījuma artikuls: 40200015





GREEN&CLEAN ID N

Ļoti efektīvs koncentrāts instrumentu un urbuļu dezinfekcijai

- Izcila tīrīšanas efektivitāte
- Piemērots visiem elastīgiem un monolītiem instrumentiem, ieskaitot temperatūras jutīgos
- 5 l koncentrāta, kas atšķaidāmi līdz 500 l darba šķīduma ar koncentrāciju 1 %
- Aizsargā jūsu instrumentus pret koroziju
- Piemērots lietošanai ultraskaņas vannās
- Nesatur formaldehīdus un fenolus
- Derīguma termiņš: 7 dienas
- Rekomendē endoskopi ražotājs Karl Storz GmbH & Co KG, Tuttlingen (Vācija)
- Atļauju izsniegusi NTI-Kahla (Rotary Dental Instruments)
- Iekļauts DGHM/VAH un ÖGHMP sarakstos
- CE 0408

Dezinfektanta spektrs/ledarbības laiks

- ierobežota vīrusu iznīcināšana (piem., HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex I tipa vīruss):
1 % šķīdums: 15 minūtes
- baktericīds/fungicīds (C. albicans):
0,25 % šķīdums: 30 minūtes,
1 % šķīdums: 5 minūtes
- tuberkulocīds:
1 % šķīdums: 1 stunda,
2 % šķīdums: 15 minūtes,
7,5 % šķīdums: 5 minūtes



GREEN&CLEAN ID N

Ekspertu viedokļi

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Mūsdienīga aktīvo aģentu kombinācija

Ceturtnajā amonija savienojumi, alkilamīns, korozijas inhibitori

Pasūtījuma artikuli

- 4 x 500 ml pudeles + mērglāze, Pasūtījuma artikuls: 60030033
- 1 x 5 l kanna, Pasūtījuma artikuls: 60030034
- Mērglāze priekš GREEN&CLEAN ID N, Pasūtījuma artikuls: 40200003
- Jaucējkrāns 5 l kannai, Pasūtījuma artikuls: 40200004



DEZINFEKCIJAS VANNA

Instrumentu dezinfekcijas vanna

- Tilpums 4 l, vāks un grozs, kas izceļas ārā
- Pasūtījuma artikuls: 40200008



DEZINFEKCIJAS VANNA

Instrumentu dezinfekcijas vanna

- Tilpums 1,25 l, vāks un grozs, kas izceļas ārā
- Pasūtījuma artikuls: 40200015



DEZINFEKCIJAS VANNA

Urbuļu dezinfekcijas trauks

- Tilpums 200 ml, vāks un sietiņš.
- Pasūtījuma artikuls: 40200013



- Dezinficēšana
- Kompresori
- Sūkņēšanas sistēmas
- Ūdens attīrīšana
- Amalgama separatori
- Pārstrāde

METASYS ... makes the difference!

METASYS Medizintechnik GmbH

Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria

Phone: +43 512 205420 - Fax: +43 512 205420 7

www.metasys.com - info@metasys.com

GERMANY

METASYS Medizintechnik GmbH

+49 2236 37 42 42

info@metasys.com

FRANCE

METASYS France S.a.r.l.

+33 4 37 90 22 15

info@metasys.fr

ITALY

DENTAL ECO SERVICE Italia Srl

+39 045 981 4477

desitalia@metasys.com

