


Viena medote – daudz iespējas

ĀRSTĒŠANAI VESTIBULĀRI

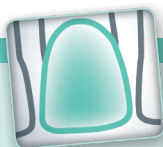

Balto plankumu ārstēšana ar Icon



1. Baltie plankumi uz priekšzobiem, bieža parādība pēc brekšu noņemšanas, tā tas arī ir šajā kliniskajā gadījumā



2. Pirms procedūras priekšzobi ir jāizolē ar šķidro koferdamu vai jebkuru aizsargbarjeru, lai aizsargātu smaganas. Tad aplicē Icon Etch skābes gēlu 2 minūtes un pēc tam materiālu noņem.



3. Apstrādātā vieta ir jānožāvē ar etanolu Icon Dry un gaisa plūsmu, sagatavojot pilnīgi sausu virsmu nākošajam solim. Šajā brīdī jau būs redzams vai baltie plankumi būs pazuduši. Ja nē, tad kodināšanas procesu ar Icon Etch var veikt atkārtoti, līdz tiek sasniegti vēlamo rezultāts. Vienā apmeklējumā šo procedūru drīkst atkārtot līdz 3 reizēm.



4. Jāveic infiltrācija ar Icon Infiltrant zemas viskozitātes sveķiem, kuri iefiltrējas dziļi iepriekš sagatavotā emaljā un aizpilda to



5. Atkārtotot infiltrāciju, Jūs nodrošināt to, ka process tiešām būs pabeigts un visi kanāliņi tiks pilnībā slēgti



6. Infiltrētajai virsmai ir tādas pat mehāniskās un vizuālās īpašības, kā veselai emaljai.



7. Jāveic beigu apstrāde ar pulēšanas diskiem. Rūpīgi nopulētā virsma samazinās arī pārkārošanās risku.



8. Pēc vienas nedēļas zobi ir pilnībā rehidratējušies un baltie plankumi ir pilnībā izzuduši. Rezultāts ir ilgtermiņa, plankumi vairs neparādīsies infiltrētajā vietā, ir novērots, ka ar laiku rezultāts vēl pat uzlabojas.


ĀRSTĒŠANAI PROKSIMĀLI



Agrīna kariesa apturēšana ar Icon



1. Apsekojot vizuāli, kariess nav redzams

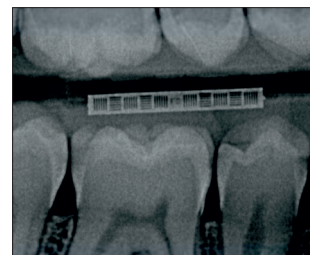

2. Veicot diagnostisku Bitewing RTG uzņēmumu, var identificēt agrīnu kariessu



3. Pielietojot Icon ir jāveic rūpīga zoba izolācija ar koferdamu. Alternatīvi iespējams lietot arī DMG MiniDam



4. Bojātā zoba virsma ir jākodina ar Icon Etch skābes gēlu 2 minūtes, lietojot speciāli izstrādāto plastikāta uzgali ar atverītiem, kur gēls attiecīgi nāk laukā tikai pa nepieciešamo pusi, lai neskartu pārējās kontaktvirsmas. Noskalot ar ūdeni 30 sekundes.



5. Apstrādātā vieta ir jānožāvē gaisa plūsmu un ar etanolu Icon Dry 30 sekundes, sagatavojot pilnīgi sausu virsmu nākošajam solim.



6. Jāveic infiltrācija ar Icon Infiltrant zemas viskozitātes sveķiem 3 minūtes, kuri iefiltrējas dziļi iepriekš sagatavotā emaljā un aizpilda to.



7. Pirms gaismošanas ar zobu diegu un gaisa plūsmu apstrādātā vieta ir jānotīra no liekā materiāla daudzuma



8. Infiltrētais Icon materiāls ir jānogaismo 40 sekundes. Procedūra jāpabeidz ar pulēšanu, izmantojot abrazīvās lentītes. Infiltrētajai virsmai ir tādas pat mehāniskās un vizuālās īpašības, kā veselai emaljai.

Zvani ☎ 8899